

1. Verwendungszweck / Anwendungsbereiche

Die FAIST AllegraMask® wird zum Schutz vor Infektionskrankheiten, die durch Übertragung von Tröpfchen und Flüssigkeiten auftreten (Tröpfcheninfektionen) eingesetzt. Die AllegraMask® schafft bei einer normalen Atmung eine dichte Barriere zwischen den Patienten bzw. Anwender und führt zu einer Verminderung der Übertragung von Tröpfchen (Fremdwirkung durch Spuckschutz). Dadurch kann das Risiko der Krankheitsübertragung gemindert werden (nicht verhindert). Bei Bedarf kann zusätzlich eine MNS Maske (OP-Maske) unter der AllegraMask® getragen werden, um das Infektionsrisiko noch weiter zu vermindern. Die FAIST AllegraMask® kann auch zur Verminderung, Verhütung und Linderung der Krankheitsübertragung und -symptomen führen, die durch Berührung von Nase und Mund auftreten, zum Beispiel durch Schutz der Übertragung von Bakterien, Viren und Pilzen durch Berührung (Selbstschutz gegen Schmierinfektion). AllegraMask® kann auch in allen Anwendungsfällen eingesetzt werden, bei denen der Anwender / Patient keine OP-Maske oder sonstige MSM aus gesundheitlichen Gründen tragen kann (zum Beispiel aus aufgrund zu langer und geminderter Respirationswege). AllegraMask® kann auch in allen Anwendungsfällen eingesetzt werden, bei denen die Mimik der Anwender / Patient eine wichtige Rolle spielt, zum Beispiel bei der Arbeit oder aus psychischen oder sozialen Anwendungsfällen. Zum Beispiel auch bei Gehörlosen oder bei Menschen mit körperlichen Einschränkungen. AllegraMask® kann auch in allen Anwendungsfällen eingesetzt werden, bei denen Gesichtsschutz erforderlich ist zur Vermeidung und Linderung von Hautkrankheiten im Gesicht, zum Beispiel Akne.

Ein vollumfänglicher Schutz gegen Viren, Bakterien oder andere biologische Agenzien kann konstruktionsbedingt nur eingeschränkt gegeben werden und kann daher nicht garantiert werden.

Der Anwendungsbereich der AllegraMask® liegt im privaten Bereich, im Servicebereich, im medizinischen Bereich, der Pflege, dem Rettungswesen und anderen Arbeitsgebieten.

2. Funktionsbeschreibung

Die Maske wird über den Nase-Mund-Bereich wie eine Brille aufgesetzt. Die Passform sollte hierbei den Mund- und Nasenbereich vollständig abdecken. Ist das nicht der Fall, sollte die Maske nicht verwendet und der Hersteller kontaktiert werden. Vor erstmaligen Gebrauch sollte die AllegraMask® gereinigt werden.

3. Sicherheitshinweise / Kontraindikationen

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sowie der Sicherheit Dritter beachten Sie bitte folgende Punkte:

- ACHTUNG: Vor erstmaligen Gebrauch bitte die AllegraMask® reinigen
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden, ansonsten kann es zu Einschränkungen der Funktion oder der Biokompatibilität kommen.
- ACHTUNG: Nicht geeignet für Klein-Kinder, u.a. wegen Kleinteile die verschluckt werden können
- ACHTUNG: Nicht geeignet für den Einsatz im chirurgischen Bereich sowie ähnlichen Einsatzgebieten (keine OP-Maske). In diesen Einsatzfällen kann die AllegraMask® als Zusatzschutz eingesetzt werden.
- Kein vollständiger Schutz vor Infektionskrankheiten durch Übertragung von Tröpfchen und Aerosolen (Tröpfcheninfektion). Bitte beachten Sie zur Vermeidung, Verhinderung und Minderung vor Infektionskrankheiten auch zusätzliche Maßnahmen wie Abstand halten und ausreichende Handhygiene.
- Beachten Sie bitte zur Vermeidung einer Infektion oder bakteriellen Kontamination den Abschnitt „Reinigung und Desinfektion“
- ACHTUNG: Die Maske wird mit einer Halteschnur geliefert. Bitte beachten Sie hierzu ggfs. die für Ihre Verwendung geltenden Bestimmungen, UVV/Arbeiten an Maschinen usw. Bei starkem Zug kann Unfallgefahr auftreten. Bitte die Halteschnur nur so anbringen, dass sie sich bei leichtem Zug vom Bügel löst.
- Unbedenklichkeit: Von den eingesetzten Materialien ist nicht bekannt, dass sie für den Benutzer schädlich sind, Hautreizungen oder Atembeschwerden verursachen. Es kann jedoch vorkommen, dass Materialien, die mit der Haut des Trägers in Kontakt kommen, bei anfälligen Personen allergische Reaktionen hervorrufen können. In diesen Fällen ist die Maske nicht zu verwenden und der Hersteller ist zu kontaktieren.
- Sollte bei längerem Tragen der Maske Unwohlsein auftreten, ist die Maske abzunehmen, nicht weiter zu verwenden und der Hersteller ist kontaktieren.
- Die AllegraMask® bietet keinen Schutz gegen mechanische Einwirkung, Stöße, Splitter, mechanische Teile und ähnliches.
- Die AllegraMask® sollte nicht verwendet bzw. sollte ausgetauscht werden, wenn sie zerkratzt, rissig oder anderweitig beschädigt sind, Änderungen in Form und Farbe aufzeigt, Chemikalien, Ölen oder Fetten ausgesetzt waren, großer Hitze oder über lange Zeit der Sonne ausgesetzt waren. Schäden sind für den Endbenutzer möglicherweise nicht sichtbar.
- Bei Verwendung von Antibeschlag und Antistatikmittel: Bei Verwendung ist nur das vom Hersteller empfohlene Mittel zu verwenden. Beachten sie in diesen Fall auch die Sicherheitshinweise des Antibeschlag Herstellers.
- Es wird empfohlen die AllegraMask® maximal zwei Stunden ohne Unterbrechung tragen.

4. Reinigung und Desinfektion

Reinigen oder desinfizieren Sie die Maske bitte nach jedem Gebrauch. Bei einem Patientenwechsel muss die Maske desinfiziert werden.

4.1. Reinigung

Waschen Sie alle Teile in warmen Wasser mit Hilfe einer Seifenlösung bzw. mit alkalischem Reinigungsmittel; anschließend unter fließendem warmen Wasser abspülen, damit Rückstände entfernt werden. Harte Bürsten, Scheuermittel oder andere Materialien, welche die Oberflächen beschädigen können, dürfen nicht verwendet werden.

4.2. Desinfektion

Eine Desinfektion aller Kunststoffteile kann mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln, die für Kunststoffmaterialien geeignet sind, durchgeführt werden.

Die Herstellerangaben über Einwirkzeiten bzw. Anwendungskonzentrationen der Desinfektionsmittel müssen unbedingt eingehalten werden. Beachten sie auch die Sicherheitshinweise des Desinfektionsmittels des Herstellers.

5. Antibeschlag und Antistatikmittel

Antibeschlag und Antistatikmittel sind als sinnvolle Ergänzung anwendbar. Bei Verwendung ist nur das von uns angegebenen Mittel zu verwenden. Beachten sie in diesen Fall auch die Sicherheitshinweise des Herstellers.

6. Technische Daten / Lagerung/Transport

Lagertemperatur: -40 °C bis 60 °C

Einsatztemperatur: -18 °C bis 50 °C

Einsatzdauer: Es wird empfohlen die AllegraMask® maximal zwei Stunden ohne Unterbrechung tragen.

Lagerung: Lagerung wird im Wäsche- oder Baumwollbeutel empfohlen. Nicht in der Sonne liegen lassen.

7. Materialien

Kunststoff-Komponenten können Phthalate enthalten (siehe Kennzeichnung). Besondere Vorsicht bei: Neugeborenen • Kindern vor der Pubertät • Stillenden Frauen • Schwangeren Frauen

1	Bügel	MABS
2	Nasenhalter	SEBS
3	Schutzmaske	PC
4	Halteschnur	Baumwolle

8. Garantie

1 Jahre Garantie gemäß unseren Garantiebestimmungen: - gewähren wir ab Kaufdatum auf Material oder Fabrikationsfehler nur in Verbindung mit dem Kaufbeleg.

9. Ersatzteile / Zubehör

- Bügel
- Schutzschild
- Halteschnur
- Nasenhalter
- Antibeschlag VisioClear, Bosch (Bitte Herstellerangaben für den Einsatz beachten)

10. Haftungsausschlussklausel

Die obigen Informationen sind nach unserem besten Wissen korrekt. Es wird jedoch nicht behauptet, dass diese vollständig sind, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet werden. Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben, sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern, basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Firma kann nicht für irgendwelche Schäden, die durch den Umgang oder Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden. Haftung ausgeschlossen.

11. Zeichenerklärung

	Latex frei		Vor Hitze und Licht schützen
	Nicht zur Wiederverwendung		Bestellnummer
	Gebrauchsanweisung beachten		Chargenbezeichnung
	Haltbar bis		Enthält Phthalat
	Hergestellt am		Phthalatfrei

