



Prodotto

BLAYCO® Visiera

Codice

PF-01



Data

March 2020

Specification N°

ETP/340/00

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali

- Schermo Trasparente: PET
- Fascia: 50% Polyester and 50% Elastane
- Schiuma protettiva: Polyurethane
- Rivetto: Resina acetlica
- Confezione primaria: custodia con cerniera in PE, richiudibile
- Confezione secondaria: Scatola di cartone

Misure

- Larghezza Visiera: 325 mm
- Lunghezza totale Visiera: 230 mm
- Lunghezza Visore: 210 mm
- Spessore Visore: 400 µm.
- Profondità Visiera: 40 mm
- Lunghezza schiuma protettiva: 225 mm

Biocompatibilità

- ISO 10993-5: Non cytotoxic
- ISO 10993-10: Non sensitizing
- ISO 10993-10: Negative intracutaneous irritation test

Prodotto con materiali ipoallergenici.

Sterilizzazione


- Prodotto non sterile.

Conservazione e manutenzione

- Proteggere dalla luce solare diretta / dall'esterno.
- Conservare in luogo asciutto.
- Prodotto monouso. Nessuna manutenzione richiesta
- Limiti di temperatura: 5°C – 40°C

Confezionamento

- Custodia unitaria con cerniera in PE.
- Scatola di cartone con 50 custodie.

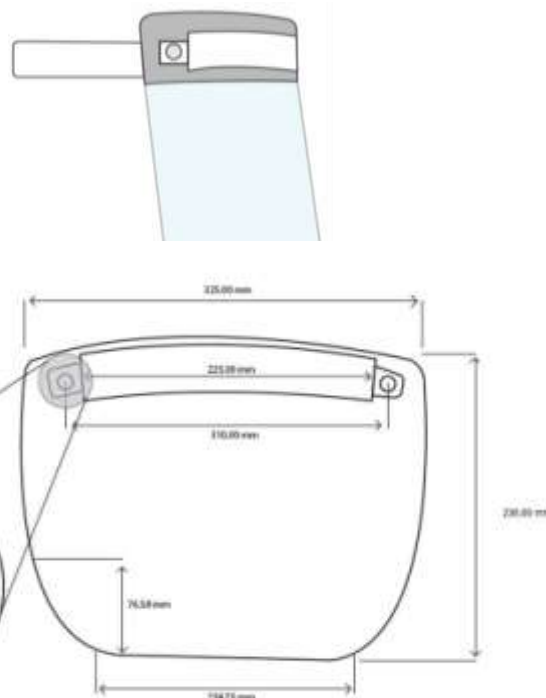



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Offre protezione per le mucose facciali (occhi, naso e bocca).
- Prevenzione del contagio di malattie prodotte da microrganismi che si diffondono tramite goccioline grazie al blocco degli schizzi di fluidi corporei e / o aerosol.
- Fascia per il sostegno della visiera.
- Prodotto con materiali leggeri. Comodo per l'uso.
- La visiera di protezione è compatibile con l'uso di occhiali aggiuntivi e / o maschere complementari.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima che il personale sanitario sia esposto a qualsiasi possibile contaminazione, dovrebbe:

- Posizionare la Visiera Blayco® sulla testa, in modo tale da posizionare la fascia elastica nella parte posteriore e lo schermo nella parte anteriore, coprendo il viso.
- Regolare la posizione della Visiera Blayco® fino a quando non viene opportunamente adattata.

Telic, S.A.U. garantisce un solo utilizzo per questo prodotto. Se è necessaria la disinfezione, si consiglia di pulire la visiera con acqua e sapone e disinfettare con etanolo al 70%, perossido di idrogeno allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1%.

REGULATORY INFORMATION

~~Telic, S.A.U. garantisce che questo prodotto è conforme al regolamento (UE) 2016/425 relativo al personale I dispositivi di protezione e che sono stati fabbricati secondo le direttive del sistema di garanzia della qualità sono certificati ISO 13485.~~

Questo prodotto è classificato come:

- Prodotto di categoria I secondo l'allegato I del regolamento (UE) 2016/425, punto e
 - Codice GMDN: 11961- **Visiera paraspruzzi monouso**
-